



Instrucciones de Coleccion para un Auto-Examen Vaginal

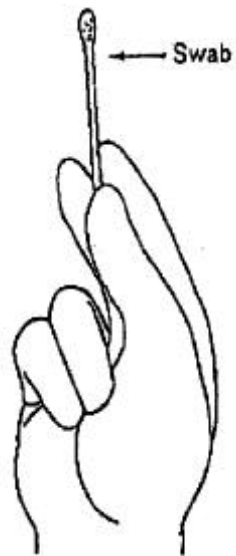

Paso 1.


Abra el paquete y quite el tubo y el paquete con las letras anaranjadas. Remueva el algod6n del paquete. No toque la punta del algod6n.

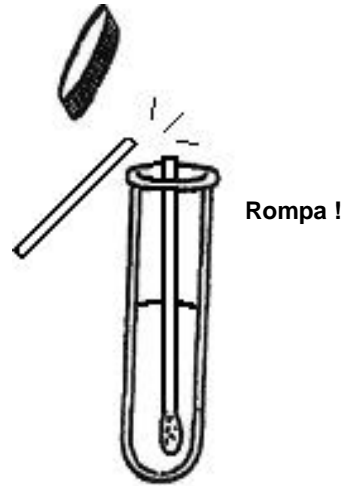

Paso 3.

Remueva la tapa de la probeta. Ponga el algod6n en el tubo. Asegurese que la punta del algod6n toque el fondo del tubo. No rompa la tapa.


Rompa el algod6n en el lugar marcado.

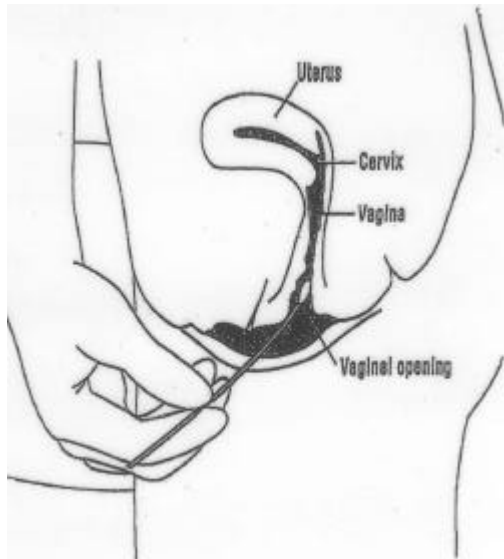

Paso 2.

Ponga la punta del algod6n 2 pulgados dentro de la abertura de su vagina y haga dos peque1os 6rculos con la punta.

Asegurese que el algod6n toque los lados de su vagina. Saque el algod6n de su vagina.

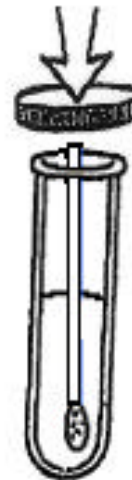

Paso 4.

Ponga la tapa de regreso y cierre para prevenir un derrame. Trate de que el liquido no salpique fuera del tubo.

Paso 5.

Deseche las envolturas. **Lavese sus manos.** Devuelva el tubo al trabajador de salud.